

Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt.

Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden.

Eine Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT[®]

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 071 81 / 47 50 6 - 99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT StopAndGo



Positionierungsmatte



KUBIVENT[®]

Produkt-Beschreibung

Das Kubivent StopAndGo ist eine Gleitauflage mit Bremsfunktion. Unterstützt den Transfer in die aufrechte Sitzposition und sichert diese Position. Die Gefahr des Wegrutschens nach Vorne wird durch das Anti-Slip-Vlies vermindert, die Haut dadurch geschont. Für den täglichen Einsatz im Rollstuhl.



Zweckbestimmung

Hilfsmittel zur Stabilität der korrekten und aufrechten Sitzposition im Rollstuhl und gewebeschonenden Positionierung im Sitz.

Indikation

Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition (durch Immobilität oder durch erhebliche Schädigung der Körperwahrnehmung) oder bei neurologischen Erkrankungen. Personen, die überwiegend sitzen und ihre Sitzposition schwer bis gar nicht eigenständig korrigieren können (vor und zurück).

Kontraindikation

Kontraindikationen sind nicht bekannt. Aber auch hier gilt: Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Vor dem Umsetzen in den Rollstuhl sollte unbedingt die Bremse gesetzt werden. Danach wird die StopAndGo Matte in den Rollstuhl gelegt. Die StopAndGo Matte legen Sie so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl, dass die Transferrichtung „mit Pfeilen auf der Matte gekennzeichnet“ immer zum Rückenteil des Rollstuhls zeigt. Nach dem Umsetzen des Patienten wird der Transfer eigenständig oder durch leichtes Drücken an den Beinen / unterhalb der Kniescheibe durch die Pflegekraft aktiviert. Der Oberkörper muss dabei nach vorne geneigt sein, um das Gewicht zu verlagern. Der Patient gleitet zur Rückenlehne. Das StopAndGo ermöglicht den Transfer nur in Richtung Rückenlehne und bremst automatisch die Bewegung nach vorne.

- Wenn Ihnen die Anwendung der Transferhilfen nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller zu melden sind.

Technische Daten

B x T in cm	Artikelnummer	Gewicht in g
45 x 37	THSG4537	365
40 x 37	THSG4037	355

Auch in Sondergrößen lieferbar.

Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material: 100 % Polyamid Faser, beschichtetes Polyestergewirke

Reinigung

Das StopAndGo kann in der Waschmaschine oder durch Handwäsche gewaschen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann das StopAndGo mit einem Tuch abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, hausübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden.

Reinigung in der Waschmaschine: Das StopAndGo kann in der Waschmaschine bei 95°C gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass die hohe Temperatur ein Größenverlust von bis zu 2 cm nach dem ersten Waschen nach sich ziehen kann. Wir empfehlen eine 60°C Wäsche und die Trocknung im Wäschetrockner bei schwacher Temperatur. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Desinfektion

Das StopAndGo kann problemlos wisch- und flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Desinfektion in der Waschmaschine: Bei Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder auf der Packungsbeilage vom Desinfektionsmittel-Hersteller zu finden ist. Beachten Sie zudem unsere Wasch-Hinweise unter dem Punkt „Reinigung“.

Sicherheitshinweise

Vor dem Einsatz des StopAndGo's sollte die Bremse beim Rollstuhl gesetzt sein. Das unbeabsichtigte Ablegen des StopAndGo's auf dem Boden sollte vermieden werden, da Sturzgefahr durch die Gleitfunktion besteht. Rauchen und das Anwenden einer Flamquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.

Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir, das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts.