

Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts.

Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt.

Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden.

Eine entsprechende Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT[®]

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 071 81 / 47 50 6 - 0 · Fax: 071 81 / 47 50 6 - 99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT StandUp



Aufrichthilfe



KUBIVENT[®]

Produkt-Beschreibung

Der Kubivent StandUp unterstützt das Aufrichten und Umsetzen der Patienten vom/ins Bett in den/vom Rollstuhl und anderen Sitzgelegenheiten oder in den Stand.

Indikation / Zweckbestimmung

- Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition.
- Kraftminimiertes und Rückenschonendes Aufrichten und Umsetzen von Personen aus dem Bett oder Stuhl durch die Pflegekraft vom Sitz in den Stand.
- Hilfsmittel zur Mobilisation der Beine aus dem Bett bzw. ins Bett.



Herausnehmbare Kunststoffplatte

Kontraindikation

Personen, die nicht frei sitzen können und über eine geringe Körperspannung verfügen. Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Vor dem Einsatz des StandUps ist darauf zu achten, dass der Patient sich in einer stabilen Sitzposition befindet. Der StandUp wird hinter den Rücken gebracht und im unteren Rückenbereich angelegt. Das eingearbeitete Anti-Rutsch-Material in der Mitte des Gurtes wirkt dem Verrutschen beim Transfer entgegen. Positionieren Sie sich sicher vor dem Patienten, greifen Sie nach den Handgriffen und beginnen mit dem Transfer. Bei schwereren Patienten empfehlen wir den Transfer in kleinen 'Bewegungen' Stück für Stück zur Seite vorzunehmen und die Person umzusetzen. Der Patient sollte den Transfer nach Möglichkeit mit unterstützen in dem er das Gewicht nach vorne auf die Füße verlagert und dadurch mithilft. Vor jedem Transfer sollte daher eine Risikobewertung vorgenommen werden.

Für den Transfer empfehlen wir zusätzlich den Kubivent HoldUp. Der HoldUp ist ein Sicherungsgürtel für die Pflegekraft, an dem sich der Patient beim Umsetzen festhalten und somit die Bewegung durch Gewichtsverlagerung weiter unterstützen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Kubivent HoldUp.

Technische Daten

Größe in cm	Artikelnummer	Gewicht in g
75 x 20	THSU7520	540

Einsatzbereich: bis 150 kg Körpergewicht

Material Stoff: 100 % Polyester, beschichtetes Polyestergewirke,

Material Platte: 100 % PVC, Kunststoffplatte schwarz, lose eingelegt, Größe: 72x15x0,02cm



KUBIVENT StandUp



KUBIVENT HoldUp

Reinigung

Der StandUp kann in der Waschmaschine oder durch Handwäsche gewaschen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann der StandUp mit einem Tuch abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, hausübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, entnehmen Sie vor der Reinigung die eingelegte Kunststoffplatte, die sich durch einen Klettverschluss nach der Reinigung wieder bequem einsetzen lässt.

Reinigung in der Waschmaschine: Der StandUp kann in der Waschmaschine bei 60°C gewaschen werden und bei schwacher Temperatur im Trockner getrocknet werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, entnehmen Sie vor der Reinigung die eingelegte Kunststoffplatte, die sich durch einen Klettverschluss nach der Reinigung wieder bequem einsetzen lässt.

Desinfektion

Der StandUp kann problemlos Wisch- und Flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Desinfektion in der Waschmaschine: Bei Verwendung eines Desinfektionsvollwaschmittels kann die Desinfektion beim Waschen in der Waschmaschine vorgenommen werden. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittelhersteller. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder auf der Packungsbeilage vom Desinfektionsmittel-Hersteller zu finden ist. Beachten Sie zudem unsere Wasch-Hinweise unter dem Punkt „Reinigung“.

Sicherheitshinweise

Beim Umsetzen von Personen besteht erhöhte Sturzgefahr. Das Umsetzen und Aufrichten von Personen sollte vom Fachpersonal vorgenommen werden. Unter besonderen Umständen sollte eine zweite Person zur Absicherung hinzugezogen werden. Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.